



Problembhebung/Garantie

Wenn die Einheit nicht richtig funktioniert, stellen Sie sicher, dass die Batterie nicht leer ist und in richtiger Richtung eingesetzt wurde und der Deckel richtig aufgeschraubt ist. Falls das Gerät noch immer nicht funktioniert, wenn der Start/Stopp-Knopf gedrückt wird, sollte die Einheit an den Hersteller zurückgeschickt werden.

Die Einheit wurde für maximal 3 Behandlungen pro Tag entwickelt. Übermäßige Nutzung kann zu Schäden an den mechanischen Teilen und zum Erlöschen der Herstellergarantie führen. Die Einheit enthält keine Teile, die gewartet werden müssen. Jeder Versuch der Reparatur oder Veränderung führt zu einem Verlöschen der Garantie. Dies bezieht sich nicht auf Ihre gesetzlich zugesicherten Rechte.

Batterie-Informationen

Das Gerät funktioniert mit 1 AAA-Batterie (mitgeliefert). *Entnehmen Sie die Batterie aus dem Produkt, wenn es längere Zeit nicht betrieben wird. *Entnehmen Sie eine leere Batterie aus dem Gerät. *Entsorgen Sie Batterien sicher. *Um Batterien sollten sich Erwachsene kümmern, sie sollten nie in die Hände von Kindern gelangen.

* Warnung: Vermeiden Sie Hautkontakt, wenn Batterien auslaufen. Im Falle von Hautkontakt sofort mit viel fließendem Wasser abwaschen. Falls eine Hautreizung anhält, ärztlichen Rat einholen.

Entsorgung

Dieses Gerät unterliegt der WEEE-Richtlinie, die von Herstellern verlangt, Elektro-Altgeräte zum Recycling/zur Entsorgung zurückzunehmen.



Spezifikationen

- Stromversorgung: DC 1.5V (1 x AAA-Batterie)
- Frequenz: 180Hz - 280Hz nominal
- Ungefähre Abmessungen: 100 mm x 37 mm x 32 mm
- Gewicht (inkl. Batterien): 60 g
- Betriebsbedingungen: 5°C bis 40°C; <90 % RH
- Aufbewahrungs-/Transport-Bedingungen: 0°C bis 45°C; <90 % RH

Symbolbeschreibungen

- Herstelleranschrift
- Achtung, Begleitdokumente beachten
- Anwendungsteil des Typs B
- Obere und untere Aufbewahrungsbedingungen
- Bedienungsanleitung beachten
- An/Aus-Schalter



Medical Technology Ltd, PO Box 223, Harbour Court, Les Amballes,
St Peter Port, Guernsey, GY1 1WU Großbritannien

Email: info@sciaticalm.com
Website: www.sciaticalm.com

In GB von MTL hergestellt
Company Registration No: 51663



Doc Ref: IFU_DE_01. Revision 1. Date: 25.09.18

Bedienungsanleitung

Bedienungsanleitung

1. Teile

Das Produkt besteht aus Sciaticalm-Einheit, Gurt und einer AAA-Batterie.



Wischen Sie das Äußere der Einheit mit einem trockenen Tuch ab. Der Gurt kann in warmer Seifenlauge gewaschen werden. Die Einheit nicht in Wasser eintauchen.

2. Vor der Verwendung

Das Gerät benötigt 1 AAA Batterie (enthalten).

Schrauben Sie vor der Verwendung die Batterieabdeckung ab und entfernen Sie den Streifen zur Isolierung der Batterie. Packen Sie die Batterie aus und legen Sie sie ein. Schrauben Sie den Deckel wieder fest auf.



Legen Sie die Batterien immer vollständig und richtig herum ein. Die Pole im Batteriefach sind mit '+' und '-' gekennzeichnet.


3. Verwendung des Geräts

Um die Leistung des Geräts zu optimieren, muss der Vibrationskopf auf dem Ischiasserv aufliegen und mit einem der Gurte befestigt werden. Das kann im Lendenwirbelbereich oder am Bein erfolgen. Unter Umständen ist es notwendig, das Gerät zu verschieben, um die optimale Stelle für die Schmerzlinderung zu finden.

Der Gurt wird dann gesichert, sodass das Gerät nicht verrutscht. Er darf nicht zu fest anliegen, damit die Durchblutung nicht behindert wird.

Der Start/Stopp-Knopf auf der Batterieabdeckung wird gedrückt, um die Einheit anzuschalten. Sciaticalm kann jederzeit durch das Drücken des Start/Stopp-Knopfes an- oder ausgeschaltet werden. Das Gerät darf jedes Mal nicht länger als 10 Minuten verwendet werden.

Es wird empfohlen, Sciaticalm 30 Minuten pro Tag zu verwenden, in separaten 10-minütigen Einheiten. Wenn Sie das Gerät zuerst benutzen, kann es zu leichten Schmerzen im Fußbereich kommen.

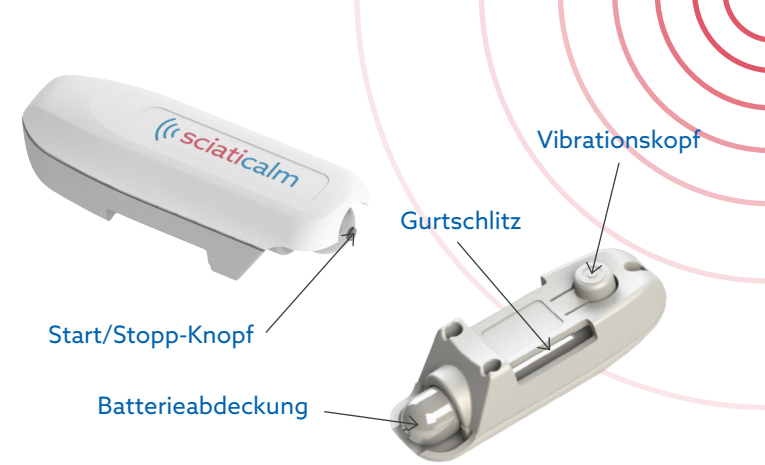


Das ist normal und ein Zeichen, dass das Gerät ordnungsgemäß funktioniert. Sie können das Gerät für weniger als drei Zyklen am Tag oder für kürzere Zeit verwenden, bis der Schmerz abklingt.

4. Anpassen der Einheit



Ziehen Sie den Gurt durch den Schlitz unter dem Batterie-Fach. Dabei muss die Klettseite zum Batteriefach zeigen.

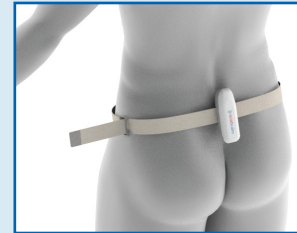

Verschieben Sie das Gerät am Gurt entlang und sichern Sie es unter der Lasche. Legen Sie das Gerät auf die schmerzende Stelle und ziehen Sie das Ende des Gurts durch die schwarze Schnalle.



Verwenden Sie den längeren Gurt, um das Gerät am unteren Rücken bzw. im Lendenwirbelbereich zu befestigen. Das Gerät kann bei Bedarf gedreht werden, damit es nach unten zeigt.



Verwenden Sie den kürzeren Gurt, um das Gerät auf der Hinterseite des Beins hinter dem Knie zu befestigen. Das Gerät kann jetzt durch Drücken des Start-/ Stoppknopfes eingeschaltet werden.

Warnungen und Sicherheit

Bitte lesen und verstehen Sie die folgenden Warnungen vor der Verwendung des Geräts, um die sichere und korrekte Verwendung zu gewährleisten und Verletzungen zu vermeiden.

- Stellen Sie sicher, dass die Batterie nicht ausläuft. Falls die Batterie Anzeichen für das Auslaufen zeigt, beachten Sie den Abschnitt „Batterie-Informationen“.
- Das Gerät kann am Bein oder unteren Rücken (Lendenwirbelbereich) angewendet werden. Verwenden Sie es an keiner anderen Körperregion.

- Achten Sie darauf, dass die Batterie richtig eingelegt wurde.
- Wenn Sie sich während der Anwendung unwohl fühlen oder sie unangenehm für Sie ist, beenden Sie die Verwendung des Geräts sofort.
- Verwenden Sie das Gerät nur auf normaler Haut. Wenn Sie an einer Hautkrankung oder frischem Narbengewebe im Anwendungsbereich leiden, sollten Sie vor der Verwendung ärztlichen Rat einholen.
- Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn Sie schlafen.
- Sie dürfen das Gerät nicht auseinandernehmen, reparieren oder in irgendeiner Weise verändern, weil dadurch die Garantie erlischt und dies möglicherweise zu einer Fehlfunktion des Geräts oder einer Verletzung führt. Tauchen Sie das Gerät nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten ein.

- Falls Sie eine Rötung der Haut bemerken, beenden Sie die Verwendung des Geräts sofort.
- Werfen Sie das Gerät nicht und lassen Sie es nicht fallen. Es sollte nicht verwendet werden, wenn daran Schäden zu sehen sind.
- Verwenden Sie keine Chemikalien, um Teile der Einheit zu reinigen.
- Das Gerät darf nur von Personen verwendet werden, die mindestens 18 Jahre alt sind.

Für medizinische Elektrogeräte gelten besondere Vorsichtsmaßnahmen in Bezug auf die elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) und sie dürfen nur gemäß der Anleitung in diesem Handbuch verwendet werden. Tragbare oder mobile Funkgeräte können sich auf medizinische Elektrogeräte auswirken.